

**La linea innovativa e completa  
per la disinfezione del Vostro studio**

# Innocid®



**INNOVAZIONE,  
QUALITA'  
E SICUREZZA  
Made in Germany**



Distribuito da:

**GRUPPO ELI-DENT** shop

[www.innocid.com](http://www.innocid.com)



# INTRODUZIONE



*La linea Innocid offre al cliente esigente un'assortimento completo per la disinfezione e per l'igiene in tutto lo studio.*

*La linea comprende tutto il necessario, dal disinfettante per superfici con efficacia ultraveloce, al disinfettante per strumenti, per sistemi di aspirazione e per frese, fino al disinfettante senza alcool per le superfici delicate, e da non dimenticare le salviettine microstrutturate Premium da utilizzare imbevute con la soluzione disinfettante desiderata.*

*Innocid pensa anche alla cura delle Vostre mani con una crema idratante che si assorbe*

## Campi di applicazione dei prodotti descritti:



**Disinfezione  
Mani**



**Disinfezione  
Strumenti**



**Disinfezione  
Frese**



**Disinfezione  
Superfici**



**Disinfezione  
Superfici  
Delicate**



**Disinfezione  
Sistemi  
Aspirazione**



**Disinfezione  
Lavabi**



**Disinfezione  
Impronte**



**Disinfezione  
Cavo Orale**



INNOCID FACILITA IL VOSTRO LAVORO E VI DA' SICUREZZA

*immediatamente ed un disinfettante mani delicato.*

*Il programma Innocid garantisce un'igiene a 360° in tutto il Vostro studio.*

*Le sue formulazioni sono basate su ingredienti biocompatibili e testati scientificamente e scrupolosamente da esperti sotto i criteri più innovativi.*

*Tutti i prodotti Innocid hanno un largo spettro d'azione, sono facili nell'utilizzo ed efficaci in tempi brevissimi.*

*L'utilizzatore apprezza la sicurezza e la praticità delle confezioni di questi prodotti innovativi.*

- I** INNOVAZIONE
- N** NUOVI E PIÙ SEVERI CRITERI DI TEST
- N** NUOVE FORMULE ECOCOMPATIBILI
- O** OTTIMALE POTERE DISINFETTANTE
- C** COMPLETA LINEA DI DISINFEZIONE
- I** INDIVIDUALMENTE ADATTATO ALLE VOSTRE ESIGENZE
- D** DERMATOLOGICAMENTE TESTATO

*Igea (dal greco Υγιεία con il significato di salute, rimedio, medicina) è una figura della mitologia greca e successivamente romana. Figlia di Asclepio e di Epione, Igea è la dea della salute e dell'igiene.*





## HD-i 50 (CE 0124)

**Soluzione igienizzante  
e per la disinfezione  
chirurgica delle mani**

### Applicazioni

Disinfezione igienica e chirurgica delle mani, disinfezione della cute prima di iniezioni ed aspirazioni periferiche ed articolari, disinfezioni prima di interventi chirurgici, disinfezione della cute sebacea.

### Utilizzo

**Disinfezione igienizzante delle mani:** Frizionare le mani con la soluzione mantenendole umide per 30 secondi.

**Disinfezione chirurgica delle mani:** Frizionare le mani e gli avambracci con la soluzione mantenendoli umidi per 1 minuto.

**Disinfezione pre-operatoria:** Pulire la pelle attentamente con la soluzione e tenerla umida per 1 minuto.

**Disinfezione della cute sebacea:** Pulire la pelle con la soluzione e tenerla umida per 10 minuti.

**Disinfezione prima di iniezioni ed aspirazioni:** Pulire la pelle attentamente con la soluzione e tenerla umida per 15 secondi.



**Cod. 708.7001**  
Dispenser 500 ml

### Principi attivi

100 g di soluzione contengono:  
62,8 g 2-propanolo

### Spettro d'azione:

**Battericida** secondo VAH/DGHEM, EN 1500, EN 12791, prEN 12054

**levurocida** (candida albicans) secondo VAH/DGHEM, EN 1275

**tuberculocida** secondo EN 14348

**"virucida limitato"** (efficace contro virus capsulati, es. HBV, HIV, HCV).

### Tempi d'azione:

**Batteri e candida albicans:**

**Disinfezione igienizzante delle mani secondo VAH/DGHEM, EN 1500, prEN 12054, EN 1275:**

concentrato 30 sec.

**Disinfezione chirurgica secondo VAH/DGHEM, EN 12791, prEN 12054:**

concentrato 1 min.

**TbC (tubercolosi) secondo EN 14348 (a carico biologico alto):**

concentrato 30 sec.

**Virus capsulati (es. HBV, HIV, HCV) secondo BGA (RKI)/DDV:**

concentrato 15 sec.



## HDG-i 42 (CE 0124)

**Gel igienizzante  
e per la disinfezione  
chirurgica delle mani**

### Applicazioni

Disinfezione igienica e chirurgica delle mani, disinfezione della cute prima di iniezioni ed aspirazioni periferiche ed articolari, disinfezioni prima di interventi chirurgici, disinfezione della cute sebacea, impacchi freddi.

### Utilizzo

**Disinfezione igienizzante delle mani:** Frizionare le mani con la soluzione mantenendole umide per 30 secondi.

**Disinfezione chirurgica delle mani:** Frizionare le mani e gli avambracci con la soluzione mantenendoli umidi per 1 minuto.

**Disinfezione pre-operatoria:** Pulire la pelle attentamente con la soluzione e tenerla umida per 1 minuto.

**Disinfezione della cute sebacea:** Pulire la pelle con la soluzione e tenerla umida per 10 minuti.

**Disinfezione prima di iniezioni ed aspirazioni:** Pulire la pelle attentamente con la soluzione e tenerla umida per 15 secondi.



**Cod. 708.7042**  
Dispenser 500 ml

### Principi attivi

100 g di gel contengono:  
40,0 g di etanolo; 20,0 g di 2-propanolo;  
0,2 g di 2-fenilfenolo

### Spettro d'azione:

**Battericida** secondo EN 1500, EN 12791, prEN 12054;

**levurocida (candida albicans)** secondo EN 1275, EN 1650;

**tuberculocida** secondo EN 14348, efficace contro i virus capsulati.

### Tempi d'azione:

**Batteri:**

**Disinfezione igienizzante delle mani secondo EN 1500, prEN 12054:**

Conc. 30 sec.

**Disinfezione chirurgica delle mani secondo EN 12791:**

Conc. 1 min.

**Candida albicans secondo EN 1275, EN 1650 (carica biologica alta):**

Conc. 30 sec.

**TbC secondo EN 14348 (carica biologica alta):**

Conc. 30 sec.

**Virus capsulati, es. HBV, HCV, HIV secondo BGA (RKI), (Vaccinia/BVDV) con carica biologica alta secondo EN 14476):**

Conc. 30 sec.

## Applicazioni

Deterge le mani a fondo. Le sostanze attive sono delicate sulla pelle, ipoallergeniche (testate dermatologicamente) ed allo stesso tempo reidratanti. Lascia una fragranza fresca e piacevole.

Contiene vitamine. Per una pelle sana, morbida ed idratata anche in caso di uso frequente.

## Utilizzo

Frizionare le mani con una o due gocce di sapone fino alla formazione di una schiuma omogenea, poi sciacquare.

**Cod. 708.98015**  
Dispenser 500 ml.

**Cod. 708.98012**  
Flacone ricarica 1 lt



(CE 0124)

# HW-i 20

**Sapone medicale  
per la deterzione  
delle mani**



## Principi attivi

Sodio laurilettere solfato, cocoamido-propilbetaina, glutammato di lauroyl del sodio, cocamide dea, cloruro di sodio, metilisotiazolinone, alcol benzilico, benzilsalicilato, CI 42051.

## Applicazioni

Lozione di alta qualità per proteggere ed idratare le mani, creata appositamente per i professionisti che sono costretti ad indossare continuamente dei guanti protettivi. La lozione ha una consistenza molto piacevole, è di rapido assorbimento ed il suo pH è ben tollerato da tutti i tipi di pelle. Calma e previene irritazioni e lascia le mani morbide e ben idratate a lungo.

## Utilizzo

Distribuire la lozione uniformemente sulle mani prima di indossare i guanti. Viene assorbita rapidamente lasciando un delicato profumo. Ripetere l'applicazione una volta tolti i guanti.

**Cod. 708.8020**  
Tubetto 30 ml



# HL-i 41

(CE 0124)

**Lozione emolliente  
ed idratante per le mani**



## Principi attivi

Pantenolo, Glicerina ed estratti di Calendula Officinalis

## Applicazioni

Salviettine di tessuto non tessuto di alta qualità e antistrappo, imbevute di disinfettante per superfici con alcol e sali quaternari di ammonio, per una comoda e rapida disinfezione di tutte le piccole superfici, dei dispositivi medici non invasivi ed anche delle mani (ben tollerato dalla pelle). Non utilizzare su superfici non resistenti all'alcol.

Agisce rapidamente senza lasciare residui, soltanto una piacevole fragranza.

## Utilizzo

Aprire la bustina contenente le salviette imbevute ed inserirla nel barattolo dispenser. Tirare su la prima salvietta, dal centro del rotolo, e farla passare dall'apertura nel coperchio, poi chiudere il barattolo.

Strofinare con cura le superfici da disinfectare con la salvietta imbevuta e lasciar agire per il tempo d'azione indicato. Assicurarsi che tutte le superfici sono state coperte di disinfettante. Gettare la salvietta monouso. Non utilizzare su materiali non resistenti all'alcol, come il vetro acrilico e l'ecopelle.

## Principi attivi

100 g di soluzione disinfettante contengono: 43,0 g etanolo, 8,0g 1-propanolo, 0,04g didecildimethylammoniochloride.

100 salviette, 190 g di soluzione disinfettante per superfici con alcol. 1,9g di disinfettante a salvietta



(CE 0124)

# DW-i 20t

**Salviettine  
disinfettanti  
pronte per l'uso, prive di aldeide**



## Spettro d'azione:

**Battericida** (incl. MRSA) secondo VAH/DGHM, EN 1040, EN 1276; **levurocida** (*candida albicans*) secondo VAH/DGHM, EN 1275, EN 1650; **tuberculocida** secondo VAH/DGHM, EN 14348, "virucida limitato" (efficace contro virus capsulati, es. HBV, HIV, HCV), adeno virus.

## Tempi d'azione:

**Batteri** secondo VAH/DGHM, EN 1040 e EN 1276 (carico biologico alto): Concentrato: 1 min.  
**Candida albicans** secondo VAH/DGHM, EN 1275 e 1650 (carico biologico alto): Concentrato: 1 min. **TbC** (tubercolosi)-inattivazione secondo VAH/DGHM, EN 14348 (carico biologico alto): Concentrato: 1 min. **Virus capsulati** (es. HBV, HIV, HCV) secondo BGA(RKI)/DVV con carico biologico: Concentrato: 30 sec. **Adeno-virus** secondo EN14476 (carico biologico alto): Concentrato: 30 conc.



## RSD-i 70

(CE 0124)

**Disinfettante rapido  
pronto per l'uso,  
privo di aldeide.  
Contiene alcol**

### Applicazioni

Il prodotto disinfetta rapidamente tutte le superfici, mobili e impianti fissi, manipoli e contrangoli. Non utilizzare su materiali sensibili all'alcol (vetro acrilico, ecopelle).

### Utilizzo

Il disinfettante è **pronto per l'uso**. Spruzzare direttamente sulla superficie da disinfettare da una distanza di circa 30cm oppure spruzzare su un panno monouso bianco e strofinare. Assicurarsi che le superfici siano completamente coperte dal disinfettante. Attendere il tempo di azione indicato poi togliere il prodotto in eccesso con un panno monouso. Lascia un fresco profumo.

### Spettro d'azione:

**Battericida** (incl. MRSA) secondo VAH/DGHH, EN 1040, EN 1276;  
**levurocida (candida albicans)** secondo VAH/DGHH, EN 1275, EN 1650;  
**tubercolocida** secondo VAH/DGHH, EN 14348, "virucida limitato" (efficace contro virus capsulati, es. HBV, HIV, HCV), **adeno-virus, noro- e rotavirus**.



### Principi attivi

100 g di prodotto contengono:  
37g 1-propanolo, 24g di etanolo

**Cod. 703.1002**  
Flacone spray 1 lt

**Cod. 703.1003**  
Tanica 5 lt

### Tempi d'azione:

**Batteri secondo VAH/DGHH, EN 1040, EN 1276:**

Conc. 30 sec. (a carico biologico basso VAH/DGHH)

Conc. 1 min. (a carico biologico alto VAH/DGHH, EN 1276)

**Candida albicans secondo VAH/DGHH, EN 1275, EN 1650:**

Conc. 30sec. (a carico biologico basso VAH/DGHH)

Conc. 1 min. (a carico biologico alto VAH/DGHH, EN 1650; EN 1275)

**TBC (tubercolosi)- In attivazione secondo VAH/DGHH, EN 14348**

Conc. 30 sec. (a carico biologico basso VAH/DGHH)

Conc. 1 min. (a carico biologico alto VAH/DGHH, EN 14348)

**Virus capsulati (es. HBV, HIV, HCV) secondo BGA (RKI)/DW  
con carico biologico:** Conc. 30 sec.

**Adeno-virus (EN 14476):** Conc. 30 sec. (a carico biologico alto)

**Noro-virus (EN 14476):** Conc. 1 min. (a carico biologico basso)

**Rota-virus (EN 14476):** Conc. 30 sec. (a carico biologico alto)



## RFD-i 44

(CE 0124)

**Disinfettante e detergente  
in schiuma privo di aldeide ed alcol.  
Ideale per le superfici delicate  
che non sopportano l'uso di alcol,  
come il vetro acrilico e l'ecopelle**

### Applicazioni

Disinfettante rapido per la detersione e la disinfezione di piccole superfici delicate e dispositivi medici non invasivi. Si utilizza anche in altri settori, come in quello farmaceutico, cosmetico, alimentare, veterinario ed ospedaliero e in tutte le aree in cui si trovano delle superfici contaminate. Il flacone ha una duplice testina per la nebulizzazione e per la schiuma. Si consiglia di utilizzare il prodotto in versione schiuma per prevenire irritazioni del tratto respiratorio.

### Utilizzo

La **soluzione è pronta per l'uso**, si usa in forma non diluita. Spruzzare la schiuma da una distanza di 20-30cm sulle superfici da disinfettare e distribuirle uniformemente con un panno bianco monouso. Assicurarsi che le superfici siano coperte completamente. Lasciare agire per il tempo d'azione elencato in seguito. In caso di superfici fortemente contaminate pulirle prima con un detergente ma senza miscelare il disinfettante con altri detersivi. Prima di utilizzare il prodotto sui materiali molto delicati, come l'ecopelle, si consiglia di testare il prodotto su una parte nascosta. Per evitare striature, dovuto ai sali quaternari di ammonio, basta ripassare ogni tanto la superficie disinfettata con un panno monouso inumidito con acqua.

### Spettro d'azione:

**Battericida** (incl. MRSA) secondo VAH/DGHH, EN 1040, EN 1276, EN 13697; **levurocida (candida albicans)** secondo VAH/DGHH, EN 1650, EN 1275, EN 13697; "virucida limitato" (efficace contro virus capsulati, es. HBV, HIV, HCV) ed efficace contro **rota-virus** e **noro-virus non capsulati**.

### Tempi d'azione:

**Batteri (incl. MRSA) secondo VAH/DGHH, EN 1040, EN 1276, EN 13697 (a carico biologico alto):** concentrato 1 min.

**Candida albicans secondo VAH/DGHH, EN 1650, EN 1275, EN 13697 (a carico biologico alto):** concentrato 1 min.

**Virus capsulati (es. HBV, HIV, HCV) secondo BGA (RKI)/DVV:** concentrato 1 min. (con carico biologico)

**Rotavirus secondo BGVV/DVV:**  
concentrato 1 min.

**Norovirus secondo EN 14476 (a carico biologico basso):** concentrato 30 min.



**Cod. 703.91011**  
Flacone spray 750 ml

### Principi attivi

100 g di prodotto contengono:  
0,24 g **cloruro dialchil-dimetil-ammonio**  
0,48 g **cloruro alchil-(aril)-dimetil-ammonio**

**A base di sali quaternari  
di ammonio**



# DW-i 70p BIG PREMIUM

*Salviettine di alta qualità da inumidire  
con una soluzione disinfettante a scelta*

75 salviettine nel pratico formato extragrande 270 x 270mm,  
in tessuto non tessuto di altissima qualità, con struttura e  
spessore simile alla microfibra.

Estremamente resistente agli strappi, non lascia  
pelucchi.

**Cod. 703.97203**

Secchiello dispenser vuoto

**Cod. 703.97202**

2 confezioni ricarica  
75 salviettine asciutte



Da inumidire con una soluzione disin-  
fettante per superfici a scelta fra RSD-i  
70 (con alcol) e RFD-i 44 (senza alcol).

Dispenser professionale dotato di  
sistema a serbatoio per l'immisione  
della soluzione disinfettante che assi-  
cura un'ottimale conservazione delle  
salviettine inumidite.

Perfetto assorbimento e perfetto rila-  
scio del liquido disinfettante.

Sistema pratico ed economico, con  
una sola salviettina PREMIUM si pu-  
lisce una stanza intera dello studio,  
dove ci vogliono altrimenti 15-20 sal-  
viettine standard.



**SALVIETTE  
STANDARD**

**SALVIETTE  
BIG  
PREMIUM**

## Applicazione

Le salviettine PREMIUM si diffe-  
renzano dalle salviettine norma-  
li per la loro consistenza simile  
alla microfibra, dando la sensa-  
zione di avere in mano un vero  
panno con cui pulire.  
Sono adatte per la deterzione e  
la disinfezione comoda e rapida  
delle superfici e dei dispositivi  
medici non invasivi come mani-  
poli e contra-angoli.

## Principi attivi

Vedi soluzione disinfettante utilizzata  
per inumidire le salviettine.

**Ecologico perché completamente biodegradabile.**

## Utilizzo

Inserire una confezione di salviettine asciutte nel secchiello dispenser. Le salviettine possono essere imbevute con 1 - 1,5 litri (a secondo del grado di umidità desiderata) di disinfettante per superfici, a scelta fra la soluzione con alcol RSD-i 70 e la soluzione senza alcol RFD-i 44. Distribuire la soluzione disinfettante sul rotolo di salviettine. Tirare sù la prima salviettina, dal centro del rotolo, e farla passare dall'apertura nel coperchio, poi chiudere il secchiello. Il dispenser è pronto all'uso. L'apertura del dispenser permette anche di reinserire la salviettina, se estratta per sbaglio.  
Chiudere il coperchio accuratamente dopo ogni utilizzo.



## Orange Cleaner

(CE 0124)

**Solvente spray  
all'olio d'arancia.  
Efficace nella rimozione  
di incrostazioni da strumenti  
e piccole superfici**

### Applicazioni

Spray detergente e disincrostante **a base di olio d'arancia naturale** per facilitare la rimozione di ossido di zinco, cemento, residui di alginato e gesso oltre ai materiali d'impronta, sangue ed altre impurità da strumenti e piccole superfici.

Da utilizzare su portaimpronta, strumenti, lastre di vetro e ceramica. Ideale per pulire l'acciaio inossidabile ed altre superfici. Non utilizzare su materiali sintetici non resistenti ai solventi.

### Principi attivi

*A base di terpene d'arancia*



### Utilizzo

Spruzzare uniformemente sulla superficie da pulire da una distanza di 20-30 cm.

**Cod. 415.9002**  
Flacone spray 250 ml



## IDP-ic 70 (CE 0124)

**Detergente e disinfettante  
in polvere ad ampio spettro,  
incluso spore per tutti i tipi  
di strumenti a rotazione  
e chirurgici, con protezione  
anticorrosione**

### Applicazioni

Questo disinfettante strumenti è adatto per la deterzione e la disinfezione di tutti strumenti a rotazione e chirurgici, anche per endoscopi. E' **delicato (pH 6,5) e protegge efficacemente gli strumenti dalla corrosione**. Biodegradabile, in forma diluita può essere smaltito nei normali scarichi domestici.

**Cod. 701.2301**  
Secchiello 2 kg

### Principi attivi

Percarbonato di sodio,  
tetra-acetil-diamina.

*A base di  
percarbonato di sodio*

### Utilizzo

La polvere disinfettante per strumenti è in forma concentrata e deve essere diluita in acqua prima dell'utilizzo. **Si consiglia una concentrazione dell'1%:** Versare un cucchiaino dosatore (15ml = 10g) in ogni litro d'acqua preferibilmente calda (30°) per facilitare il processo di scioglimento della polvere. Concentrazioni maggiori (2%) diminuiscono i tempi d'azione.

Lasciare riposare la soluzione per 15 minuti mescolando di tanto in tanto. Un eventuale deposito della polvere sul fondo della bacinella è voluto, non influenza l'azione disinfettante, ma agisce da cuscinetto. Adesso la soluzione è pronta: Immergere gli strumenti subito dopo l'utilizzo (smontati o aperti), avendo cura che tutte le superfici da disinfettare siano coperte dalla soluzione, evitando bolle o vuoti d'aria. Trascorso il tempo d'azione indicato togliere gli strumenti dalla soluzione e sciacquarli sotto l'acqua corrente. Per l'ultimo risciacquo usare acqua demineralizzata poi asciugarli con cura. Non utilizzare su strumenti in rame, ottone o strumenti con superfici cromate o nichelate danneggiate. La soluzione va cambiata una volta al giorno. Evitare di mescolarla con altri detergenti o disinfettanti. **Utilizzabile anche in vasca ad ultrasuoni.**

### Spettro d'azione:

**Battericida** secondo EN 13727, EN 14562;  
**levurocida** secondo EN 13624, EN 14562;  
**tubercolocida** secondo EN 14348, EN 14563;  
**virucida** secondo EN 1447; **sporicida** secondo EN 13704.

### Tempi d'azione:

**Batteri (incl. micobatterio terrae) ad alto carico biologico:** 1,0% 5min. **Candida albicans ad alto carico biologico:** 1,0% 5min. **Virucida secondo EN 14476 (adeno e polio-virus) ad alto carico biologico:** 2,0% 10min. - 1,0% 60min. **Sporicida secondo EN 13704 (b.subtilis, b.cereus, c.sporogenes):** 2,0% 10min. - 1,0% 60 min.



## Applicazione

Soluzione combinata di efficacia superiore per la deterzione e la disinfezione di frese e strumenti a rotazione di tutti i tipi. Protegge le frese dalla corrosione. Biodegradabile, in forma diluita può essere smaltito nei normali scarichi domestici.

## Utilizzo

Soluzione pronta per l'uso. Si utilizza in forma non diluita. Immergere le frese subito dopo l'uso nella soluzione facendo attenzione che siano completamente coperte, senza vuoti o bolle d'aria. Trascorso il tempo d'azione risciacquare le frese accuratamente con acqua potabile ed asciugarle. La soluzione va cambiata a secondo del grado di inquinamento, si consiglia comunque di cambiarla una volta al giorno. Evitare di mescolare la soluzione con altri disinfettanti o detergenti. Non utilizzare per l'alluminio.

## Spettro d'azione:

**Battericida** secondo VAH/DGHH, EN 13727, EN 14561. **Levurocida (candida albicans)** secondo VAH/DGHH, EN 13624, EN 14562. **Tuberculocida** secondo VAH/DGHH. **"Virucida limitato"** secondo RKI (efficace contro virus capsulati, p.e. HBV, HIV, HCV).

## Tempi d'azione:

**Batteri** secondo VAH/DGHH, EN 13727, EN 14561 (carico biologico alto):

Concentrato: 5 min.

**Candida albicans** secondo VAH/DGHH, EN 13624, EN 14562

(carico biologico alto): Concentrato: 5 min.

**TbC (tubercolosi)** secondo VAH/DGHH (carico biologico alto):

Concentrato: 5 min.

**Virus capsulati (es. HBV, HIV, HCV)** secondo BGA(RKI)/DVV

(vaccinia, BVDV secondo EN 14476, carico biologico alto):

Concentrato: 5 min.

## DB-i 40

(CE 0124)

**Detergente  
e disinfettante  
per frese e strumenti  
a rotazione  
con protezione  
anticorrosione,  
privo di aldeidi**

Cod. 702.2101  
Flacone 2 lt

## Principi attivi

100 g di prodotto contengono:

0,56 g Bis (3-aminopropil)dodecilamino,

0,50 g didecilmethylpoliossietilammonioipropiato.

## Applicazione

Questo disinfettante strumenti è adatto per la disinfezione e deterzione di tutti strumenti a rotazione e chirurgici, anche per endoscopi. Utilizzabile anche in vasca ad ultrasuoni. Nonostante la bassissima concentrazione copre un ampio spettro d'azione. Protegge efficacemente gli strumenti dalla corrosione. Biodegradabile, in forma diluita può essere smaltito nei normali scarichi domestici.

## Utilizzo

Disinfettante per strumenti concentrato. **Si consiglia una concentrazione dell' 1%** (10ml di concentrato su un litro d'acqua). Diminuendo o aumentando le concentrazioni variano anche i tempi d'azione. Seguire la tabella di diluizione e rispettare i relativi tempi.

Grazie alla sua eccezionale forza pulente è possibile combinare la disinfezione e la deterzione secondo le linee guida RKI riguardanti gli strumenti ed endoscopi. La sua formula priva di aldeide impedisce l'aggregazione delle proteine.

Per dosare il prodotto va allentato il tappo della camera dosatrice di mezzo giro e pompato il liquido in essa. Mescolare la quantità dosata con acqua nella proporzione come da tabella di diluizione. Rispettare i relativi tempi d'azione.

Immergere gli strumenti (smontati o aperti) subito dopo l'utilizzo avendo cura che tutte le superfici da disinfettare siano coperte dalla soluzione, senza vuoti o bolle d'aria.

Cambiare la soluzione a secondo del grado di inquinamento, si consiglia comunque di cambiarla una volta al giorno. Dopo il tempo necessario per la disinfezione gli strumenti vanno sciacquati accuratamente con acqua potabile. Si consiglia di utilizzare acqua demineralizzata per l'ultimo risciacquo. Quindi asciugare gli strumenti.

## Spettro d'azione:

**Battericida** secondo VAH/DGHH, EN 13727, EN 14561; **levurocida (candida albicans)** secondo EN 13624, EN 14562; **tuberculocida** secondo VAH/DGHH, EN 14348, EN 14563; **micobattericida** secondo EN 14348, EN 14563; **"virucida limitato"** (efficace contro virus capsulati, es. HBV, HIV, HCV).

## Principi attivi

100 g di prodotto contengono:

7,0 g Bis (3-aminopropil)dodecilamino,

6,3 g idecilmethylpoliossietilammonioipropiato.

Cod. 701.2001 - Flacone dosatore 1 lt

Cod. 701.2002 - Tanica 5 lt



## ID-ic 40

(CE 0124)

**Detergente e  
disinfettante liquido  
per strumenti, con protezione  
anticorrosione, privo di aldeidi.  
Massima concentrazione**

## Tempi d'azione:

**Batteri** secondo VAH/DGHH (ad alto carico biologico): 1,0% 5min.

**Batteri** secondo VAH/DGHH, EN 13727, EN 14561 (ad alto carico biologico): 0,5% 15min. - 0,25% 60min.

**Candida albicans** secondo VAH/DGHH, EN 13624, EN 14562 (ad alto carico biologico): 1,0% 5min. - 0,5% 15min. - 0,25% 60min.

**TbC (tubercolosi)** secondo VAH/DGHH, EN 14348, EN 14563:

4,0% 15min. (ad alto carico biologico secondo VAH/DGHH)

1,0% 60min. (EN 14563)

0,75% 60min. (EN 14348)

**Micobatteri** secondo EN 14348, EN 14563:

1,5% 60min. (EN 14563)

0,75% 60min. (EN 14348)

**Virus capsulati (es. HBV, HIV, HCV)** secondo BGA(RKI)/DVV, EN 14476 (ad alto carico biologico):

1,0% 5min. - 0,5% 15min.

0,25% 60min.



## SS-ic 40 (CE 0124)

**Disinfettante concentrato per impianti di aspirazione privo di aldeidi. Non fa schiuma**

### Applicazioni

Soluzione concentrata a base di sali di ammonio quaternari, privo di aldeidi, per la detersione e disinfezione di impianti di aspirazione odontoiatrici, separatori di amalgama e lavabi di risciacquo. Colaudato da anni dai riuniti Kavo, Sirona ecc.

**Ha il notevole vantaggio di non fare schiuma**, il che significa che il sistema d'aspirazione viene pulito in tutte le parti anche lì dove altri prodotti che fanno schiuma non puliscono per via della formazione di bolle d'aria contenute nella schiuma. Questo fatto assicura una detersione completa che fa durare di più l'impianto. Economico nell'utilizzo, **disinfezione rapida ed efficiente già a concentrazioni basse**. Delicato sulle superfici ed ecologico. Lascia un gradevole profumo.

### Principi attivi

Cloruro dimetil-diocil-ammonio, cloruro benzil-dimetil-dodecil-ammonio.

**Cod. 705.5001**  
Flacone 2,5 lt

**Cod. 705.5002**  
Tanica 5 lt



### Utilizzo

Per evitare problemi nel funzionamento dell'impianto di aspirazione e assicurare un'igiene sicura la disinfezione dovrebbe avvenire come segue: Il disinfettante per impianti di aspirazione è concentrato e **deve essere diluito con acqua prima dell'uso al 2% o al 3%** (20/30ml di concentrato su un litro d'acqua).

Aspirare circa un litro di questa miscela nei tubi del sistema di aspirazione e lasciar agire, secondo i tempi di azione indicati, per esempio durante la pausa pranzo o durante la notte. Si consiglia di disinfeettare l'impianto di aspirazione uno o due volte al giorno, a secondo dell'utilizzo. Al termine del tempo di esposizione sciacquare l'impianto con acqua per rimuovere i contaminanti disciolti dai tubi. In caso di elevate quantità di sangue o secrezioni si consiglia di sciacquare l'impianto di aspirazione con acqua subito dopo la seduta. In presenza di forti contaminazioni o dopo un prolungato periodo di inutilizzo si consiglia di utilizzare un detergente aggiuntivo.

### Spettro d'azione:

**Battericida** secondo VAH/DGHM, EN 13727, EN 14561, EN 1276. **Levurocida (candida albicans)** secondo VAH/DGHM, EN 13626, EN 14562, EN 1650. **Levurocida (candida albicans)** secondo VAH/DGHM, EN 13625, EN 24562, EN 1650. **"Virucida limitato"** (efficace contro virus capsulati, es. HBV, HIV, HCV) secondo BGA(RKI)/DVV.

### Tempi d'azione:

**Batteri e candida albicans secondo VAH/DGHM come disinfettante strumenti (a carico biologico alto):** 2,0% 5 min. - 1,0% 60 min.

**Batteri secondo EN 1276 (a carico biologico alto):** 2,0% 5 min.

**Candida albicans secondo EN 1650 (a carico biologico alto):** 2,0% 5 min.

**Batteri secondo 13727 e EN 14561 (a carico biologico alto):** 3,0% 2 min.

**Candida albicans secondo 13624 e EN 14562 (a carico biologico alto):** 3,0% 2 min.

**Virus capsulati (es. HBV, HIV, HCV) secondo BGA (RKI)/DVV (con carico biologico):** 2,0% 2 min.



## SPN-i 70 (CE 0124)

**Disinfettante e detergente per lavabi di risciacquo, privo di aldeidi**

### Applicazione

Il disinfettante NANO è una schiuma speciale di facile applicazione e di rapido effetto utilizzato per la detersione, la disinfezione e la manutenzione del lavabo di risciacquo orale del riunito odontoiatrico. Grazie alla sua formula attiva rimuove efficacemente, ma delicatamente, depositi di calcare, sangue e perfino i coloranti contenuti nelle pastiglie rilevatrici della placca e materiali da impronta. La schiuma aerosol pronta per l'uso ha un effetto disinfettante che può essere utilizzata anche per lavabi, toilette e piastrelle.

La schiuma forma una specie di pellicola protettiva sul lavabo che aiuta i contaminanti a scivolare via insieme all'acqua di risciacquo, rendendo molto più pratica e veloce la ripulitura del lavabo senza dover intervenire manualmente.

### Principi attivi

Bis (3-aminopropil)dodecilamino, etanolo.



### Utilizzo

Agitare brevemente la bomboletta. Premere sulla valvola, tenendo la bomboletta rivolta verso il basso, per far uscire la schiuma.

La schiuma va applicata su tutto il bordo superiore del lavabo. Mentre scivola verso il sifone lascia una barriera protettiva invisibile. Lasciare agire per il tempo d'azione indicato poi risciacquare con acqua o se necessario, pulire manualmente.

Si consiglia l'utilizzo dopo ogni contaminazione e comunque prima di disinfeettare il sistema di aspirazione.

### Spettro d'azione:

**Battericida** secondo EN 13697, **levurocida (candida albicans)** secondo EN 13697, **tubercolocida** secondo EN 14348.

### Tempi d'azione:

**Batteri e candida albicans secondo EN 13697:**

**Puro (non diluito):** 1 min. (a carico biologico basso)

**TbC-inattivazione secondo EN 14348**

**Puro (non diluito):** 5 min. (a carico biologico basso)

**Cod. 705.6011**

Flacone spray 400 ml

## Applicazioni

Il **disinfettante pronto per l'uso** è a base di sali di ammonio quaternari e privo di aldeidi. Si utilizza per la deterzione e disinfezione di tutti i materiali da impronta, portaimpronta e protesi, ma anche per poliesteri, alginati ed idrocolloidi.

**Agisce rapidamente e rimuove tutti gli agenti contaminanti** come sangue e saliva. Lascia un profumo gradevole. Può essere utilizzato anche nella vasca ad ultrasuoni.

## Utilizzo

Per questioni di igiene la disinfezione delle impronte dovrebbe avvenire sempre nello studio odontoiatrico prima di consegnare le impronte al laboratorio odontotecnico.

Immergere l'impronta per 5 minuti nella soluzione pronta per l'uso facendo attenzione che sia completamente coperta dalla soluzione.

Per alginati e idrocolloidi si consiglia di immergere le impronte brevemente nella soluzione e di asciugarle per 5 minuti. Non miscelare con altri detergenti o disinfettanti.

Si consiglia di cambiare la soluzione ogni giorno.

Senza contaminazioni la soluzione rimane stabile per 2 settimane.

## Spettro d'azione:

**Battericida** (incl. MRSA) secondo EN 1279, EN 1040 e VAH/DGHM,

**fungicida (candida albicans)** secondo VAH/DGHM,

**levurocida** secondo EN 1275, EN 1650,

**"virucida limitato"** (efficace contro virus capsulati, es. HBV, HIV, HCV) e rota-virus.

## Tempi d'azione:

**Batteri (incl. MRSA) secondo VAH/DGHM**

(a carico biologico alto): Conc. 5 min.

**Candida albicans secondo VAH/DGHM**

(a carico biologico alto): Conc. 5 min.

**Virus capsulati (es. HBV, HIV, HCV)**

secondo BGA(RKI)/DVV

(con carico biologico): Conc. 5 min.

**Rota-virus secondo BVV/DVV:** Conc. 5 min.

**Cod. L701.4001**  
Tanica 5 lt

## Principi attivi

**Cloruro N-alchil(C<sub>12</sub>-C<sub>18</sub>)-N-benzil-N**

**Cloruro N, N-didecil-N,**

**Cloruro N-alchil (C<sub>12</sub>-C<sub>14</sub>)-N-etilbenzil-N,**

**N-dimetil-ammonio**

# IM-i 20

(CE 0124)

**Disinfettante  
per impronte  
senza aldeidi**



## Applicazione

Collutorio ORAHEX forte senza alcol è indicato per la pulizia e la cura professionale del cavo orale. Possiede un'azione battericida, dona freschezza all'alito e riduce la riformazione della placca. Previene carie, gengivite e paradentite. Può essere utilizzato anche in caso di gengive infette o infiammate. Usare come misura preventiva prima di qualsiasi trattamento odontoiatrico.

## Utilizzo:

Sciagquare il cavo orale con la soluzione non diluita per 20-30 secondi. Non risciacquare la bocca.

L'uso prolungato può causare la colorazione dei denti, che comunque può essere eliminata facilmente con lo spazzolino attraverso una pulizia energica o con la pulizia professionale.

Si sconsiglia di usare ORAHEX per un periodo superiore alle 2 settimane senza aver consultato il medico.

**SOLO PER USO ESTERNO**  
**NON INGERIRE**

## Principi attivi

Contiene **0,2% clorexidina digluconato** e **0,05% fluoruro di sodio**



# MP-i 76

(CE 0124)

**Soluzione  
antibatterica  
per il lavaggio  
del cavo orale**



**ORAHEX forte  
senza alcol**

**0,2% di CLOREXIDINA**

**Cod. 802.4211**  
Dosatore 500 ml

**Cod. 802.4212**  
Tanica 5 lt



**Lo specialista  
per l'igiene e la pulizia  
del Vostro ambiente  
e per la sicurezza  
dei Vostri pazienti**



**Importato e distribuito da:**

***ELI-DENT* s.r.l.**

Via A. Novelli, 3/a - 50135 Firenze  
Tel. +39 055 600545 - Fax +39 055 601069  
info@elidentsrl.it - ordini@elidentsrl.it

**NUMERO VERDE  
800 090 254**  
da Lunedì a Venerdì dalle 8:30 alle 18:00



**MISTO**  
Carta da fonti gestite  
in maniera responsabile  
FSC® C092781

L'azienda **ELI-DENT** nel rispetto dell'ambiente e sensibile a tutelare il patrimonio boschivo e forestale del pianeta, ha fatto stampare questo opuscolo utilizzando carta certificata FSC® (Forest Stewardship Council) prodotta con cellulosa che deriva da foreste gestite in maniera responsabile e corretta, secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed ecologici.

[www.innocid.com](http://www.innocid.com)

