

CATALOGO 2018 | 2019



conphident
DENTAL & SPECIALITIES SOLUTIONS

Edizione 01 | 01.06.18



conphident



Get smart. Get Conphident.

DENTAL SOLUTIONS

Conphident supporta il lavoro di ogni odontotecnico, proponendovi soluzioni specifiche per soddisfare le esigenze di ogni protocollo riabilitativo.

Con un occhio di riguardo alle attuali tecnologie digitali, abbiamo sviluppato una gamma completa di gessi e siliconi, ognuno dei quali è stato pensato e formulato per lavori specifici. Che vi occupiate di protesi fissa o mobile, di protesi implantare o di ortodonzia, nel nostro catalogo troverete le soluzioni ideali per migliorare l'efficienza dei vostri processi produttivi e la qualità dei vostri manufatti protesici.

Buon lavoro !

Il team Conphident.

***Get Smart.
Get Conphident.***



LABORATORIO

Gessi 5

gessi tipo IV 6

gessi tipo III 10

gessi tipo II 14

Siliconi 16

siliconi per addizione 17

siliconi per condensazione 19

siliconi accessori 20

STUDIO

Alginati 22

alginati per impronte 22

alginati per impronte ortodontiche 23



DENTAL SOLUTIONS

Gessi



gessi tipo IV | per protesi fissa e monconi

RESILIENCE⁴ REGULAR SET

Gesso extraduro per protesi fissa e monconi
per scanner CAD/CAM



Rapporto di miscelazione:
20 ml : 100 g (acqua : polvere)



Tempo di miscelazione:
30" (meccanica sottovuoto a 250 rpm)




Tempo di lavorabilità:
8'
Tempo di presa finale (Vicat):
9'-11'



Espansione lineare di presa:
0,08 % (2 h)



Tempo di rimozione dall'impronta:
30'

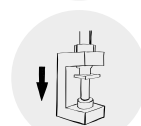

Resistenza alla compressione:
52 MPa (1 h) - **84 MPa** (24 h)

applicazioni

- Monconi di precisione in protesi fissa.
- Modelli a monconi sfilabili per ponti e corone.
- Modelli di precisione in protesi implantare.
- Modelli master.

vantaggi

- Specifico per scanner CAD/CAM.
- Indurimento "snap set".
- Rapida estrazione dall'impronta.
- Alta resistenza alla scheggiatura.
- Alta resistenza alla compressione.
- Superfici estremamente lisce.
- Ridotta espansione di presa.
- Compatibilità con tutti i materiali da impronta.



RESILIENCE ⁴ REGULAR SET	sacco 25 Kg	cartone 20 Kg	fusto 15 Kg	fusto 5 Kg	busta 1 Kg
marrone dorato	GK08RGB25S	GK08RGB20C	GK08RGB15F	GK08RGB5F	GK08RGB1C
avorio	GK08RI25S	GK08RI20C	GK08RI15F	GK08RI5F	GK08RI1C
albicocca	GK08RA25S	GK08RA20C	GK08RA15F	GK08RA5F	GK08RA1C
grigio perla	GK08RG25S	GK08RG20C	GK08RG15F	GK08RG5F	GK08RG1C
ultra bianco	GK08RW25S	GK08RW20C	GK08RW15F	GK08RW5F	GK08RW1C

gessi tipo IV | per protesi mobile

FIXMOD REGULAR SET

Gesso extraduro per protesi mobile e scheletrata



Rapporto di miscelazione:
27 ml : 100 g (acqua : polvere)



Tempo di miscelazione:
60" / 30" (manuale / meccanica)




Tempo di lavorabilità:
8'
Tempo di presa finale (Vicat):
9'-11'



Espansione lineare di presa:
0,11 % (2 h)



Tempo di rimozione dall'impronta:
35'

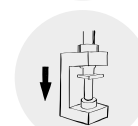

Resistenza alla compressione:
44 MPa (1 h) - **71 MPa** (24 h)

applicazioni

- Modelli per protesi scheletrata.
- Modelli per protesi in resina parziale e totale.
- Modelli per protesi combinata e overdenture.

vantaggi

- Impasto cremoso.
- Elevata scorrevolezza.
- Indurimento "snap set".
- Alta resistenza alla scheggiatura.
- Alta resistenza alla compressione.
- Alta resistenza agli shock termici.
- Compatibilità con resine polimerizzabili sia a caldo che a freddo.



FIXMOD REGULAR SET	sacco 25 Kg	cartone 20 Kg	fusto 15 Kg	fusto 5 Kg	busta 1 Kg
marrone dorato	GK11RGB25S	GK11RGB20C	GK11RGB15F	GK11RGB5F	GK11RGB1B
rosa antico	GK11RR25S	GK11RR20C	GK11RR15F	GK11RR5F	GK11RR1B
ultra bianco	GK11RW25S	GK11RW20C	GK11RW15F	GK11RW5F	GK11RW1B





gessi tipo IV | per modelli ortodontici

ORTHOMOD REGULAR SET

Gesso extraduro per modelli ortodontici



Rapporto di miscelazione:
27 ml : 100 g (acqua : polvere)



Tempo di miscelazione:
60" / 30" (manuale / meccanica)




Tempo di lavorabilità:
6'
Tempo di presa finale (Vicat):
8'-10'



Espansione lineare di presa:
0,13 % (2 h)



Tempo di rimozione dall'impronta:
35'

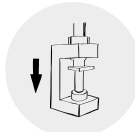


Resistenza alla compressione:
36 MPa (1 h) - **64 MPa** (24 h)

applicazioni

- Modelli ortodontici.
- Modelli da gipsoteca.
- Modelli da studio.
- Stampaggio / termoformatura mascherine ortodontiche.

vantaggi

- Colore bianco brillante e stabile.
- Elevato indice di rifrazione.
- Elevata scorrevolezza.
- Indurimento "snap set".
- Alta resistenza alla scheggiatura.
- Alta resistenza alla compressione.
- Ridotta espansione di presa.
- Compatibilità con resine polimerizzabili.

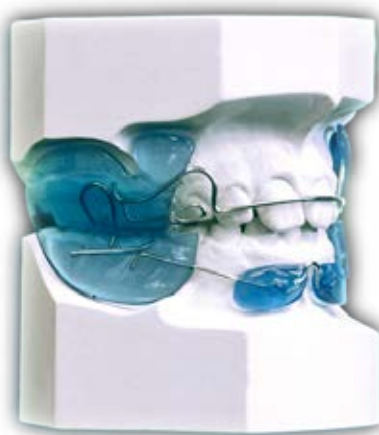

ORTHOMOD REGULAR SET

bianco neve

sacco 25 Kg

cartone 20 Kg

fusto 15 Kg

fusto 5 Kg

busta 1 Kg

GK03RW25S

GK03RW20C

GK03RW20C

GK03RW5F

GK03RW1B


gessi tipo IV | per basi di modelli

BASEFLOW REGULAR SET

Gesso fluido extraduro per basi di modelli



Rapporto di miscelazione:
24-25 ml : 100 g (acqua : polvere)

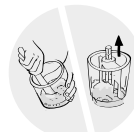

Tempo di miscelazione:
60" / 30" (manuale / meccanica)




Tempo di lavorabilità:
5'
Tempo di presa finale (Vicat):
8'-10'



Espansione lineare di presa:
0,08 % (2 h)



Tempo di rimozione dallo stampo:
30'

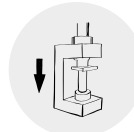

Resistenza alla compressione:
39 MPa (1 h) - **67 MPa** (24 h)

applicazioni

- Basi di modelli con stampo in gomma.
- Basi per tecnica *split-cast*.
- Modelli antagonisti.

vantaggi

- Consistenza ultra fluida: non necessita di vibrazione.
- Elevatissima scorrevolezza associata ad alta capacità di filling dello stampo.
- Autolivellante.
- Assenza di bolle d'aria.
- Indurimento "snap set".
- Ridotta espansione di presa.
- Alta resistenza alla scheggiatura.



BASEFLOW REGULAR SET

blu oltremare intenso

grigio intenso

ultra bianco

sacco 25 Kg

cartone 20 Kg

fusto 15 Kg

fusto 5 Kg

busta 1 Kg

GK12RB25S

GK12RB20C

GK12RB15F

GK12RB5F

GK12RB1B

GK12RG25S

GK12RG20C

GK12RG15F

GK12RG5F

GK12RG1B

GK12RW25S

GK12RW20C

GK12RW15F

GK12RW5F

GK12RW1B





gessi tipo III | per modelli



gessi tipo III | per articolatori

ULTRAMOD REGULAR SET

Gesso extraduro per modelli master e antagonisti



Rapporto di miscelazione:
27-28 ml : 100 g (acqua : polvere)



Tempo di miscelazione:
60" / 30" (manuale / meccanica)




Tempo di lavorabilità:
8'
Tempo di presa finale (Vicat):
9'-11'



Espansione lineare di presa:
0,16 % (2 h)



Tempo di rimozione dall'impronta:
35'

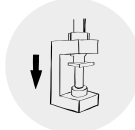

Resistenza alla compressione:
33 MPa (1 h) - **61 MPa** (24 h)

applicazioni

- Modelli di lavoro in protesi mobile (parziale/ totale).
- Modelli master.
- Modelli antagonisti.
- Modelli da studio.

vantaggi

- Elevata scorrevolezza.
- Thixotropia.
- Indurimento "snap set".
- Buona resistenza alla scheggiatura.
- Buona resistenza alla compressione.
- Espansione di presa controllata.
- Ampia versatilità di utilizzo.
- Compatibilità con tutti i materiali da impronta.




ULTRAMOD REGULAR SET	sacco 25 Kg	cartone 20 Kg	fusto 15 Kg	fusto 5 Kg	busta 1 Kg
giallo zafferano	GK01RZ25S	GK01RZ20C	GK01RZ15F	GK01RZ1F	GK01RZ1B
marrone dorato	GK01RGB25S	GK01RGB20C	GK01RGB15F	GK01RGB5F	GK01RGB1B
rosa antico	GK01RRB25S	GK01RRB20C	GK01RRB15F	GK01RRB5F	GK01RRB1B
blu oltremare	GK01RB25S	GK01RB20C	GK01RB15F	GK01RB5F	GK01RB1B
grigio perla	GK01RG25S	GK01RG20C	GK01RG15F	GK01RG5F	GK01RG1B

FIXART FAST SET

Gesso speciale per montaggio in articolatore



Rapporto di miscelazione:
31-32 ml : 100 g (acqua : polvere)

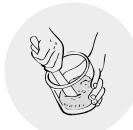

Tempo di miscelazione:
30" (manuale)




Tempo di lavorabilità:
2,5'
Tempo di presa finale (Vicat):
3'-4'



Espansione lineare di presa:
0,01 % (2 h)



Attesa per l'utilizzo dell'articolatore:
15'

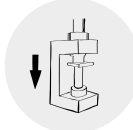

Resistenza alla compressione:
22 MPa (1 h) - **34 MPa** (24 h)

applicazioni

- Montaggio dei modelli in articolatore.
- Preparazione di zoccoli di trasferimento nella tecnica di fresaggio.
- Mascherine.

vantaggi

- Espansione di presa minima (0,01 % a 2 ore).
- Indurimento "snap set".
- Thixotropia.
- Facile stratificazione.
- Adesività ottimale.
- Tempo di presa rapido.
- Impasto plastico.



FIXART FAST SET	sacco 25 Kg	cartone 20 Kg	fusto 15 Kg	fusto 5 Kg	busta 1 Kg
bianco	GK07FW25S	GK07FW20C	GK07FW15F	GK07FW5F	GK07FW1B

DENTAL SOLUTIONS | laboratorio | gessi tipo III



DENTAL SOLUTIONS | laboratorio | gessi tipo III



FIXART REGULAR SET

Gesso speciale per montaggi multipli in articolatore



Rapporto di miscelazione:
31-32 ml : 100 g (acqua : polvere)



Tempo di miscelazione:
30" (manuale)




Tempo di lavorabilità:
4'
 Tempo di presa finale (Vicat):
5'-6'



Espansione lineare di presa:
0,01 % (2 h)



Attesa per l'utilizzo dell'articolatore:
15'

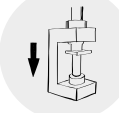

Resistenza alla compressione:
22 MPa (1 h) - **34 MPa** (24 h)

applicazioni

- Montaggio dei modelli in articolatore.
- Preparazione di zoccoli di trasferimento nella tecnica di fresaggio.
- Mascherine.

vantaggi

- Espansione di presa minima (0,01 % a 2 ore).
- Indurimento "snap set".
- Thixotropia.
- Facile stratificazione.
- Adesività ottimale.
- Tempo di presa rapido.
- Impasto plastico.

MULTI MOUNTING

FIXART REGULAR SET ha un tempo di lavorabilità leggermente prolungato, per consentire il montaggio di due articolatori con un unico impasto.



FIXART REGULAR SET	sacco 25 Kg	cartone 20 Kg	fusto 15 Kg	fusto 5 Kg	busta 1 Kg
bianco	GK07RW25S	GK07RW20C	GK07RW15F	GK07RW5F	GK07RW1B

FLASKER REGULAR SET

Gesso speciale per muffole



Rapporto di miscelazione:
38-40 ml : 100 g (acqua : polvere)




Tempo di miscelazione:
60" (manuale)



Tempo di lavorabilità:
5'
 Tempo di presa finale (Vicat):
9'-11'



Espansione lineare di presa:
0,14 % (2 h)

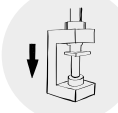

Resistenza alla compressione:
24 MPa (1 h) - **37 MPa** (24 h)

applicazioni

- Realizzazione di stampo/controstampo in muffola nella protesi mobile.
- Modelli preliminari.
- Modelli di studio.

vantaggi

- Consistenza cremosa.
- Scorrevolezza extra.
- Superfici lisce e dettagliate.
- Agevole rimozione del manufatto protesico.
- Espansione di presa bilanciata per molteplici utilizzi.
- Rapporto prezzo/qualità estremamente vantaggioso.



FLASKER REGULAR SET	sacco 25 Kg	cartone 20 Kg	fusto 15 Kg	fusto 5 Kg	busta 1 Kg
avorio	GK13RI25S	GK13RI20C	-	-	-
bianco	GK13RW25S	GK13RW20C	-	-	-



A-LAB REGULAR SET

Gesso extrafine per montaggi e usi generici



Rapporto di miscelazione:
53-55 ml : 100 g (acqua : polvere)



Tempo di miscelazione:
60" (manuale)




Tempo di lavorabilità:
4'
Tempo di presa finale (Vicat):
7'-9'



Espansione lineare di presa:
0,19% (2 h)



Tempo di rimozione dall'impronta:
30'

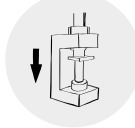

Resistenza alla compressione:
11 MPa (1 h) - **18 MPa** (24 h)

applicazioni

- Montaggi in occlusore.
- Messa in muffola di protesi parziali e totali, ponti provvisori e corone acriliche.
- Mascherine.
- Modelli diagnostici ed anatomici.
- Basi di modelli.

vantaggi

- Miscelazione rapida.
- Consistenza plastica.
- Bassa resistenza alla compressione.
- Espansione di presa controllata.
- Ampia versatilità di utilizzo.
- Economicità.
- Grado di bianco costante.



A-LAB REGULAR SET	sacco 25 Kg	cartone 20 Kg	fusto 15 Kg	fusto 5 Kg	busta 1 Kg
bianco	GK06RW25S	GK06RW20C	-	-	-

PRODOTTO	INDICAZIONI D'USO	COLORAZIONI
RESILIENCE4 REGULAR SET	gesso extraduro per protesi fissa e monconi specifico per scanner.	marrone dorato, avorio, albicocca, grigio perla, ultra bianco.
FIXMOD REGULAR SET	gesso extraduro per protesi mobile e scheletrata.	rosa antico, marrone dorato, ultra bianco.
ORTHOMOD REGULAR SET	gesso extraduro per modelli ortodontici.	bianco neve.
BASEFLOW REGULAR SET	gesso fluido extraduro per basi di modelli.	blu oltremare intenso, grigio intenso, ultra bianco.
ULTRAMOD REGULAR SET	gesso extraduro per modelli master e antagonisti.	giallo zafferano, marrone dorato, rosa antico, blu oltremare, grigio perla.
FIXART FAST SET	gesso speciale per montaggio in articolatore.	bianco.
FIXART REGULAR SET	gesso speciale per montaggio in articolatore.	bianco.
FLASKER REGULAR SET	gesso speciale per muffole.	bianco, avorio.
A-LAB REGULAR SET	gesso extrafine per montaggi e usi generici.	bianco.

	tipo*	rapporto di miscelazione	tempo di miscelazione	tempo di lavorabilità	tempo di presa finale	espansione lineare di presa	tempo di rimozione da impronta	resistenza alla compressione
nota:	-	(acqua : 100 g polvere)	(manuale/meccanica)	-	(Vicat)	(2 h)	-	(1 h / 24 h)
U.M.:	-	ml	sec	min	min	%	min	MPa
RESILIENCE4 REGULAR SET	IV	20 ml	30" meccanica	8'	9-11'	0,08 %	30'	52 - 84
FIXMOD REGULAR SET	IV	27 ml	60"/30"	8'	9-11'	0,11 %	35'	44 - 71
ORTHOMOD REGULAR SET	IV	27 ml	60"/30"	6'	8-10'	0,13 %	35'	36 - 64
BASEFLOW REGULAR SET	IV	24-25 ml	60"/30"	5'	8-10'	0,08 %	35'	39 - 67
ULTRAMOD REGULAR SET	III	27-28 ml	60"/30"	8'	9-11'	0,16 %	35'	33 - 61
FIXART FAST SET	III	31-32 ml	30" manuale	2,5'	3-4'	0,01 %	15'	22 - 34
FIXART REGULAR SET	III	31-32 ml	30" manuale	4'	5-6'	0,01 %	15'	22 - 34
FLASKER REGULAR SET	III	38-40 ml	60" manuale	5'	9-11'	0,14 %	15'	24 - 37
A-LAB REGULAR SET	II	53-55 ml	60" manuale	4'	7-9'	0,19 %	30'	11 - 18

* secondo ISO 6873:2013





DENTAL SOLUTIONS

Siliconi

siliconi per addizione | per mascherine

CONPHILAB 72 *FAST SET*

LAB PUTTY | polivinilsilossano

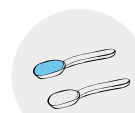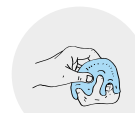Rapporto di impasto:
1:1 (acqua : polvere)Tempo di miscelazione:
30" (manuale)Tempo di lavorabilità:
1' 30"
Tempo di presa:
3' 00"Tempo di rimozione:
4' 00"Durezza:
72 shore A (24 h)


medium consistency

applicazioni

- Chiavi di registrazione occlusale.
- Mascherine per la realizzazione di:
 - protesi parziali.
 - provvisori.
 - barre.
 - denti anteriori (*protesi immediata*).
 - riproduzione gengivale (*tecnica indiretta*).
 - stampaggio della ceramica.
- Mascherine di controllo per strutture in metallo.
- Mascherine di controllo per cerature diagnostiche.
- Mascherine per la lavorazione di resine fotopolimerizzabili.
- Isolamento dei denti in muffola.
- Supporto per riparazione di protesi.
- Duplicazioni in genere.

vantaggi

- Miscelazione semplice e igienica.
- Non untuoso al tatto.
- Consistenza plastica, alta scorrevolezza.
- Elevata precisione.
- Accurata riproduzione dei dettagli.
- Elevato recupero elastico.
- Elevata stabilità dimensionale, prolungata nel tempo.
- Facilità di taglio e di fresaggio.
- Retrazione lineare estremamente bassa.
- Resistente al calore fino a 200 °C.
- Scansionabile.

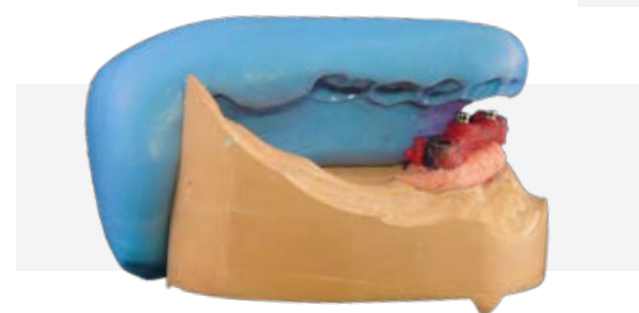CONPHILAB 72 *REGULAR SET*
celeste

2 x 5 Kg fusto (base + catalyst)


SK01FC10F





CONPHILAB 90 FAST SET


LAB PUTTY | polivinilsilossano

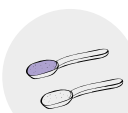

Rapporto di impasto:
1:1 (acqua : polvere)



Tempo di miscelazione:
30" (manuale)

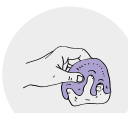

Tempo di lavorabilità:
1' 30"
Tempo di presa:
3' 00"



Tempo di rimozione:
4' 00"



Durezza:
90 shore A (24 h)


hard consistency

applicazioni

- Chiavi di registrazione oclusale.
- Mascherine per la realizzazione di:
 - protesi parziali.
 - provvisori.
 - barre.
 - denti anteriori (protesi immediata).
 - riproduzione gengivale (tecnica indiretta).
- stampaggio della ceramica.
- Mascherine di controllo per strutture in metallo.
- Mascherine di controllo per cerature diagnostiche.
- Mascherine per la lavorazione di resine fotopolimerizzabili.
- Isolamento dei denti in muffola.
- Supporto per riparazione di protesi.
- Duplicazioni in genere.

vantaggi

- Miscelazione semplice e igienica.
- Non untuoso al tatto.
- Consistenza plastica, alta scorrevolezza.
- Elevata precisione.
- Accurata riproduzione dei dettagli.
- Elevato recupero elastico.
- Elevata stabilità dimensionale, prolungata nel tempo.
- Facilità di taglio e di fresaggio.
- Retrazione lineare estremamente bassa.
- Resistente al calore fino a 200 °C.
- Scansionabile.

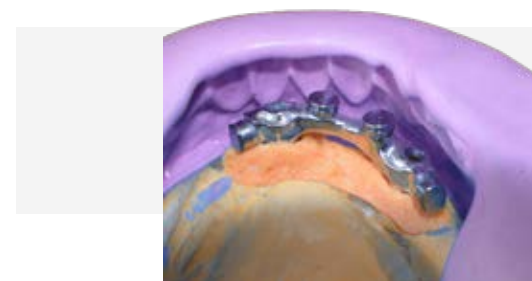

CONPHILAB 90 REGULAR SET
viola

2 x 5 Kg fusto (base + catalyst)

SK02FV10F

CONPHIMASK 85 FAST SET

LAB PUTTY | polisilossano



Rapporto di impasto:
1 misurino : 5 cm gel



Tempo di miscelazione:
30" (manuale)



Tempo di lavorabilità:
2' 00"
Tempo di presa:
4' 00"



Tempo di rimozione:
5' 00"



Durezza:
85 shore A (24 h)

hard consistency

applicazioni

- Mascherine per la realizzazione di:
 - protesi parziali.
 - provvisori.
 - barre.
 - denti anteriori (protesi immediata).
 - riproduzione gengivale (supporto per finta gengiva in silicone -tecnica indiretta).
- stampaggio della ceramica.
- Realizzazione di controstampi in protesi mobile.
- Supporto per riparazione di protesi.

vantaggi

- Miscelazione facilitata con catalizzatore in gel.
- Non untuoso al tatto.
- Reazione di polimerizzazione estremamente veloce.
- Assenza di deformazioni.
- Fedele riproduzione dei dettagli.
- Facilità di taglio e di fresaggio.
- Retrazione lineare contenuta.
- Resistente al calore fino a 120 °C.
- Rapporto prezzo/qualità estremamente vantaggioso.



CONPHIMASK 85 REGULAR SET
grigio

1 x 5 Kg fusto + 2 x 60 ml CATALYSIS


SK03FG5F





CATALYSIS

Catalizzatore in gel per CONPHIMASK

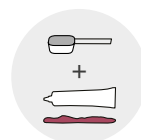

Rapporto di impasto:
1 misurino : 5 cm gel



applicazioni

- Catalisi dei siliconi per condensazione (polisilossani) CONPHIMASK 85 e similari.

vantaggi

- Formula specifica per CONPHIMASK.
- Consistenza gel: non cola.
- Reazione di polimerizzazione estremamente veloce.

CATALYSIS

rosso

1 x 60 ml tubo

SK0460T

SPOONS

Cucchiaino dosatore per CONPHIMASK | CONPHILAB



applicazioni

- Prelievo di BASE+CATALYST per CONPHILAB.
- Prelievo di CONPHIMASK.

SPOONS

blu

bianco

rosso

2 x

SK05B / SK05W / SK05R

DENTAL SOLUTIONS



Alginati



DEETAIL REGULAR SET

Alginate thixotropico ad elevata definizione dei dettagli con olio essenziale di menta piperita.



Rapporto di impasto:
9 g : 18 ml (polvere : acqua)



Tempo di miscelazione*:
30" (manuale)



Tempo di lavorabilità
1' 30"
Tempo di presa iniziale:
2' 00"



Tempo minimo di permanenza nel cavo orale:
1' 00"

*E' possibile utilizzare per la miscelazione apparecchi meccanici sottovuoto. Attenersi alle istruzioni fornite dal fabbricante.

applicazioni

- Impronte in protesi mobile e scheletrata.
- Impronte per modelli antagonisti.
- Impronte funzionali per portaimpronte individuali.
- Impronte per modelli di studio, per analisi e pianificazione.
- Impronte per modelli occlusali.

vantaggi

- Elevata definizione dei dettagli.
- Formulazione DUST FREE.
- Thixotropico.
- Elevata affinità con l'acqua, per una miscelazione semplice e igienica.
- Rapido indurimento nel cavo orale.
- Ottima leggibilità dell'impronta.
- Gradevole aroma di menta piperita - contribuisce a ridurre l'avversione alla presa d'i-pronta.



DEETAIL REGULAR SET

azzurro

fusto 7 Kg

AK01R7F

fusto 2,5 Kg

AK01R2F

busta 453 g

AK01R04B

K-ORTHO FAST SET

Alginate ortodontico ad elevato ritorno elastico con olio essenziale di menta piperita.



Rapporto di impasto:
9 g : 18 ml (polvere : acqua)



Tempo di miscelazione:
30" (manuale)



Tempo di lavorabilità
1' 00"
Tempo di presa iniziale:
1' 45"



Tempo minimo di permanenza nel cavo orale:
45"

*E' possibile utilizzare per la miscelazione apparecchi meccanici sottovuoto. Attenersi alle istruzioni fornite dal fabbricante.

applicazioni

- Impronte in ortodonzia.
- Impronte per modelli antagonisti.
- Impronte per modelli di studio, per analisi e pianificazione.

vantaggi

- Elevato ritorno elastico.
- Formulazione DUST FREE.
- Thixotropico.
- Elevata affinità con l'acqua, per una miscelazione semplice e igienica.
- Rapido indurimento nel cavo orale.
- Ottima leggibilità dell'impronta.
- Gradevole aroma di menta piperita - contribuisce a ridurre l'avversione alla presa d'i-pronta.



K-ORTHO REGULAR SET

verde

fusto 7 Kg

AK02R7F

fusto 2,5 Kg

AK02R2F

busta 453 g

AK02R04B



Indice generale | DENTAL SOLUTIONS

	pagina
RESILIENCE⁴ REGULAR SET	6
FIXMOD REGULAR SET	7
ORTHOMOD REGULAR SET	8
BASEFLOW REGULAR SET	9
ULTRAMOD REGULAR SET	10
FIXART FAST SET	11
FIXART REGULAR SET	12
FLASKER REGULAR SET	13
A-LAB REGULAR SET	14
CONPHILAB 72	17
CONPHILAB 90	18
CONPHIMASK 85	19
CATALYSIS	20
SPOONS	20
DEETAIL	22
K-ORTHO	23

